



Otrivin[®]
Baby

Extra Care - Neusspray Zoutoplossing met Vitamine B₅

Reiniget, beschermt en bevochtigt de neus, bij verstopping door slijm- en korstvorming bij neusverkoudheid.

Informatie voor de gebruiker

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Extra Care - Neusspray gebruikt. Indien u vragen heeft, stel deze dan aan uw drogist, apotheker of arts.

Wat is Otrivin Baby Extra Care - Neusspray?

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray heeft volgende samenstelling:

- Gezuiverd water
- Hoogkwalitatief zeezout
- Vitamine B₅, in de vorm van dexpanthenol (5%), een pro-vitamine B₅ (pantoteenzuur). Vitamine B₅ ondersteunt het helingsproces van huid en slijmvliezen.
- Zonder bewaarmiddelen
- Zonder drijfgas

1 ml oplossing bevat:

50 mg dexpanthenol, gezuiverd water, zeezout, kalium-monowaterstoffsfaat, kaliumdiwaterstoffsfaat.

Wat doet Otrivin Baby Extra Care - Neusspray?

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray is een isotone oplossing ter reiniging van de neusholtes, dit betekent met een aangepast zoutgehalte om neusirritatie te voorkomen. Otrivin Baby Extra Care - Neusspray **verdunt het ingedikt neusslijm en vergemakkelijkt het verwijderen van slijm en korstjes uit de neus.**

Bij een neusverkoudheid of verstopte neus kan het neus-slijmvlies bovendien uitdrogen of geïrriteerd raken. Dit kan kleine, voor het oog onzichtbare wondjes veroorzaken in de neusholte.

Door het gebruik van hoogkwalitatief zeezout, rijk aan mineralen en oligo-elementen, en de toevoeging van vitamine B₅, ondersteunt Otrivin Baby Extra Care - Neusspray bovendien **de heling van het neusslijmvlies.**

Waarvoor dient Otrivin Baby Extra Care - Neusspray?

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray wordt gebruikt **ter reiniging en verzorging van het neusje van uw baby of kind, bij verstopping door slijm- of korstvorming bij neusverkoudheid.**

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray kan ook gebruikt worden om de neusholtes te bevochtigen en te verzorgen, wanneer ze droog of geïrriteerd zijn geraakt, b.v. ten gevolge van te lage luchtvochtigheid in verwarmde ruimtes of ruimtes met airconditioning.

Controleer voordat u Otrivin Baby Extra Care - Neusspray gebruikt?

Wanneer zou u Otrivin Baby Extra Care - Neusspray beter niet gebruiken?

Gebruik Otrivin Baby Extra Care - Neusspray niet bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Wanneer moet u opletten voor het gebruik van

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray?

Wanneer Otrivin Baby Extra Care - Neusspray gebruikt wordt waarvoor het bestemd is, zijn er geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig. Na een neusoperatie of een wond aan de neus, kunt u best eerst een arts raadplegen.

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft

U kunt Otrivin Baby Extra Care - Neusspray gewoon verder blijven gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Welke neveneffecten heeft Otrivin Baby Extra Care - Neusspray?

Er werden geen ongewenste neveneffecten vastgesteld.

Hoe Otrivin Baby Extra Care - Neusspray gebruiken?

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray is geschikt voor alle leeftijden.

Zuigelingen en peuters: per toediening, 1 maal verstuiven in elk neusgat.


Kinderen boven de 2 jaar en volwassenen: per toediening, 1 tot 2 maal verstuiven in elk neusgat.

U kunt Otrivin Baby Extra Care - Neusspray 2 tot 4 maal per dag gebruiken.

Gebruiksaanwijzing doseerspray:



- De neus eerst snuiten of schoonmaken.
- Verwijder het doorzichtige bescherm dopje van de doseerspray. Hou het flesje onderaan met de duim vast en hou het witte bovenstuk tussen wijs- en middelvinger. Indien u de spray voor de eerste keer gebruikt, probeer hem dan eerst even uit door enkele keren na elkaar in de lucht te verstuiven. De doseerspray is nu klaar voor verder gebruik.
- Breng het neusstukje in het neusgat. Spreek één keer en adem tegelijkertijd in door de neus. Herhaal dit in het andere neusgat.

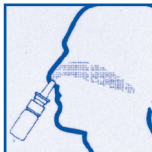

- Maak na gebruik het uiteinde schoon en plaats het bescherm dopje terug.

Om hygiënische redenen mag elke doseerspray slechts door één en dezelfde persoon worden gebruikt.

Verpakking

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray wordt geleverd in een doseerspray van 20 ml, voorzien van een doseerpompje. De doseerspray bevat geen bewaarmiddelen en geen drijfgas.

Bewaars-informatie

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray is ongeopend bij kamertemperatuur houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking is aangegeven. Bewaar Otrivin Baby Extra Care - Neusspray buiten bereik van kinderen.

Om hygiënische redenen is het aan te raden de spray niet langer dan 6 maanden na opening te gebruiken.

Otrivin Baby Extra Care - Neusspray is een medisch hulpmiddel conform de EU richtlijn 93/42/CEE.

Datum van informatie

Deze informatiefolder werd goedgekeurd in oktober 2007.

Verdeler

Novartis Consumer Health BV
Breda



32.1702
NL 899240

 NOVARTIS