


# Predictor


## ZWANGERSCHAPSTEST

De Predictor zwangerschapstest kunt u zelf uitvoeren. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de test gaat gebruiken. Haal de test niet uit de verpakking voordat u de test gaat gebruiken. Houd een horloge, klok of stopwatch bij de hand.

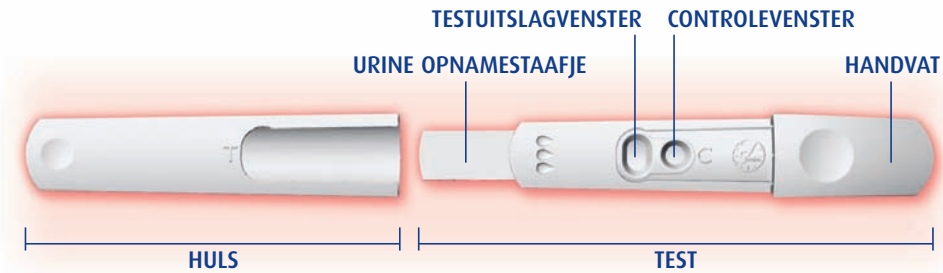

### UITVOEREN VAN DE TEST

Predictor kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd vanaf de dag dat de menstruatie moet beginnen. Haal de zwangerschapstest uit de verpakking en verwijder de huls van de test.

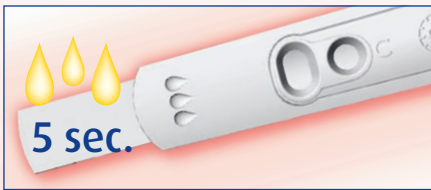

Houd het urine opnamestaafje tenminste 5 seconden in de urinestraal. Houd daarna het urine opnamestaafje naar beneden.



Plaats de huls terug op de test. Leg de test met de vensters naar boven op een vlakke ondergrond en wacht 5 minuten.

### AFLEZEN VAN DE UITSLAG

Nadat u de test heeft uitgevoerd verschijnt een roze/paarse streep in het controlevenster (C). Dit geeft aan dat u de test goed heeft uitgevoerd. Deze streep verschijnt ook als u niet zwanger bent.

Bekijk de uitslag na 5 minuten. Houd geen rekening met wijzigingen in de uitslag na 30 minuten (zie ook meest gestelde vragen).



**JA**  
Zwanger

**U bent zwanger** als een roze/paarse streep zichtbaar is in het testuitslagvenster (T). Ook als de streep zeer licht is, bent u zwanger.



**NEE**  
Niet zwanger

**U bent niet zwanger** als er geen roze/paarse streep zichtbaar is in het testuitslagvenster (T).



**Belangrijk:** er moet altijd een streep zichtbaar zijn in het controlevenster (C). Als er geen streep zichtbaar is, heeft de test niet goed gewerkt en is de testuitslag ongeldig. U heeft mogelijk te weinig urine gebruikt. Koop een nieuwe verpakking om de zwangerschapstest opnieuw uit te voeren en volg de instructies goed op.

## POSITIEVE UITSLAG? U KUNT DE TEST BEWAREN!

Een positieve uitslag blijft zichtbaar. U kunt deze positieve test bewaren. Predictor heeft haar design aangepast, zodat u gemakkelijk de test kunt bewaren: met één klik is het handvat af te breken. Zo kunt u de test bijvoorbeeld in het eerste fotoalbum van uw baby plakken!



## MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PREDICTOR ZWANGERSCHAPSTEST

### **Hoe betrouwbaar is Predictor?**

Uit laboratoriumtesten is gebleken dat Predictor meer dan 99% betrouwbaar is.

### **Hoe werkt Predictor?**

Wanneer een vrouw zwanger wordt, begint haar lichaam het zwangerschapshormoon hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) te produceren. Dit hormoon bevindt zich in toenemende hoeveelheden in de urine. Predictor toont de aanwezigheid van zelfs kleine hoeveelheden van dit hormoon in de urine aan. De test kan worden uitgevoerd vanaf de dag dat de menstruatie moet beginnen.

### **Vanaf wanneer kan ik Predictor gebruiken?**

Predictor kan de aanwezigheid van hCG in de urine aantonen met meer dan 99% betrouwbaarheid vanaf de dag waarop de menstruatie moet beginnen. Als u een onregelmatige cyclus heeft, ga dan uit van de langst mogelijke cyclus en tel daar één dag bij op om te vroeg testen te voorkomen.

Eerder testen dan de dag waarop de menstruatie moet beginnen is mogelijk, maar niet aan te raden, omdat de uitslag dan niet meer 99% betrouwbaar is. Als u eerder test, kan er sprake zijn van een bevruchting, maar kan er nog niet genoeg hCG geproduceerd zijn voor de test om aan te kunnen tonen. Ook een positieve uitslag (aangegeven voor de dag waarop de menstruatie moet beginnen) is niet betrouwbaar. Indien de bevruchte eicel zich namelijk niet heeft kunnen innestelen, zal deze uw lichaam via een normale menstruatie verlaten.

### **Moet ik de test 's ochtends uitvoeren?**

Nee. U kunt met Predictor testen op elk moment van de dag, met urine van elk moment van de dag. Wel kan overdadige vochtinname het zwangerschapshormoon verdunnen en het testresultaat beïnvloeden. Vermijd daarom overmatig drinken voordat u de test gebruikt.

### **Na 5 minuten was er geen streep zichtbaar in het testuitslagvenster, maar een paar minuten later wel.**

Als de streep binnen 30 minuten verschijnt in het testuitslagvenster, is de uitslag positief; ook al is de streep zeer licht zichtbaar.

### **Kan ik de Predictor test meerdere malen gebruiken?**

Nee. Predictor is eenmalig te gebruiken.

Nog niet zwanger, maar wel een kinderwens? De Predictor ovulatietest bepaalt de 2 meest vruchtbare dagen van uw cyclus. Voor meer informatie: [www.predictor.nl](http://www.predictor.nl)

### **Hoe lang is de uitslag zichtbaar?**

Een positieve uitslag blijft permanent zichtbaar, de achtergrond kan iets donkerder van kleur worden. U kunt de positieve test bewaren.

In het geval van een negatieve uitslag is het mogelijk dat na meer dan 30 minuten een lichte streep verschijnt in het testuitslagvenster. Deze streep, die zichtbaar wordt na 30 minuten, is geen positieve uitslag.

Belangrijk: houd geen rekening met wijzigingen in de uitslag na 30 minuten.

### **Ik vang de urine liever eerst op in plaats van het staafje in de urine te houden. Kan dat?**

Ja, vang de urine op in een schoon, droog potje. Houd het urine opnamestaafje direct in de urine voor tenminste 10 seconden (ipv 5 seconden). Let op dat u alleen het urine opnamestaafje in de urine houdt en niet het plastic van de test. Bekijk de uitslag na 5 minuten.

### **Wat moet ik doen als de testuitslag positief is?**

Als de uitslag van de test aangeeft dat u zwanger bent, kunt u contact opnemen met een verloskundige. Medische begeleiding gedurende de gehele zwangerschap is in het belang van uw gezondheid en die van uw baby.

### **Wat moet ik doen als de testuitslag negatief is, maar ik twijfel?**

Als de uitslag van de test aangeeft dat u niet zwanger bent, heeft Predictor geen zwangerschapshormoon (hCG) kunnen aantonen. Wanneer uw menstruatie binnen een week niet komt, herhaal dan de test met een nieuwe Predictor zwangerschapstest. Als de uitslag nog steeds negatief is, raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

### **Kunnen medicijnen de testuitslag beïnvloeden?**

De uitslag van de test kan uitsluitend worden beïnvloed door het gebruik van geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandelingen die hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) of hMG (humaan Menopauzaal Gonadotrofine) bevatten. Andere geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals Clomid), antibiotica, pijnstillers of de anticonceptiepil, hebben geen invloed op de uitslag van de test.

## Nog meer vragen?

Kijk op [www.predictor.nl](http://www.predictor.nl)

Mail naar [consumentenservice@predictor.nl](mailto:consumentenservice@predictor.nl)

Schrijf naar Predictor Consumentenservice, Postbus 6612, 3002 AP, Rotterdam

Vermeld bij correspondentie het nummer, dat bij lot vermeld staat op de zijkant van de buitenverpakking.

Of bel met de Predictor Consumentenservice van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 010 425 39 55

[www.predictor.nl](http://www.predictor.nl)

Samenstelling: urine opnamestaafje bestaande uit immunoglobuline G (IgG) kleurstof in een eiwitmatrix, omhuld met een gecoat membraan met antilichamen.

**Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 28°C) in de originele verpakking.**

**Buiten bereik van kinderen bewaren.**

**LOT** Lot nummer.



**Gebruiken voor de uiterste houdbaarheidsdatum, weergegeven op de buitenverpakking.**



**In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel.**

Gebruik de test maar 1 keer.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de test uitvoert.

Fabrikant: Omega Teknika - Farnham Drive - Finglas - Dublin 11 - Ierland

Distributeur: Chefaro Nederland BV - Postbus 6612 - 3002 AP Rotterdam

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien 2006/10

26056.1  
30154.1

0336