

DiaClin OogSpray



LEES ZORGVULDIG DE GEHELE BIJSLUITER VOOR U DIACLIN OOGSPRAY GAAT GEBRUIKEN, BEWAAR DEZE BIJSLUITER, MOGELIJK HEeft U DEZE LATER WEER NODIG.

DiaClin OogSpray verlicht droge en geïrriteerde ogen

- Voorkomt bacteriële infectie aan het oog
- Vermindert gevoeligheid en rode ogen

Hoe werkt DiaClin OogSpray?

Er zijn veel bacteriën, gisten en schimmels aanwezig op de huid en slijmvliezen. Deze micro-organismen worden microflora genoemd. Er bestaan zowel "goede" als "slechte" micro-organismen. Normaal gezien is er een evenwicht. De goede (nuttige) micro-organismen beschermen het lichaam tegen ziekteverwekkende micro-organismen. Als de microflora goed in evenwicht is, wordt het lichaam optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf (zoals infecties of ziekteverwekkende micro-organismen). Als het evenwicht echter verstoord is en er meer "slechte" micro-organismen aanwezig zijn, kan dit infecties veroorzaken.

Het belangrijkste actieve bestanddeel is het gepatenteerde 2QR-complex dat de huidflora optimaliseert. Dit gepatenteerde bioactieve bestanddeel neutraliseert schadelijke micro-organismen op een effectieve manier, door hun hechting aan de huid en slijmvliezen te blokkeren. Op deze manier kunnen deze bacteriën zich niet vasthechten aan onze lichaamscellen en onze cellen ook geen schade toebrengen. De unieke werking bestaat uit het selectief uitschakelen van schadelijke bacteriën, zonder enige invloed te hebben op de goede bacteriën. Zo kan het effectief de natuurlijke microflora herstellen en ontsteking of infectie voorkomen.

Gebruiksindicaties

DiaClin OogSpray is aangewezen voor mensen met diabetes die last hebben van droge, rode of geïrriteerde ogen of brandend gevoel.

DiaClin OogSpray is geregistreerd als medisch hulpmiddel.

Ingrediënten

Galactoarabinan polyglucuronic acid crosspolymer*, laagvormende bestanddelen, bestanddelen die de huidbarrière herstellen, emollientia en humectanten.




*2QR-complex: gepatenteerde bioactieve polysachariden. www.2QR.com


De bioactieve samenstelling van DiaClin OogSpray:

- Is gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex
- Geeft een aangenaam gevoel, is natuurlijk, veilig en onschadelijk
- Vrij van ureum, conserveringsmiddelen en irriterende bestanddelen


Hoe gebruikt u het product*

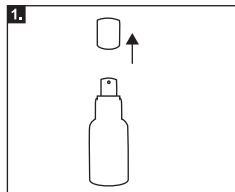

1. Haal het dopje van de flacon

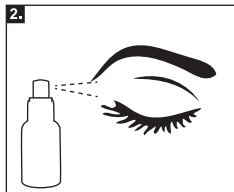

2. Spray eenmaal van op een afstand van ongeveer 8 cm op het (gesloten) ooglid

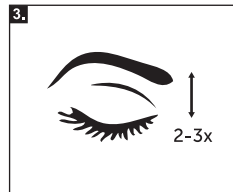

3. Knipper 2-3 keer

* Pomp de spray voor het eerste gebruik enkele keren om het pompje te vullen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Een allergische reactie op één van de bestanddelen van DiaClin OogSpray komt zeer zelden voor. Bij twijfel raden wij u aan een kleine hoeveelheid van de vloeistof op uw onderarm aan te brengen en het product even te laten inwerken. Als er een jeukende rode vlek verschijnt, raden wij u aan DiaClin OogSpray niet te gebruiken.

Let op

De DiaClin OogSpray kan kort na het aanbrengen 5 tot 20 seconden een prikkend of tintelend gevoel geven. Dit duidt op een verandering in de samenstelling van het oogvocht. Het prikken heeft geen nadelig effect op het oog of op de werkzaamheid van het product. DiaClin OogSpray en alle individuele ingrediënten zijn getest en goedgekeurd voor veiligheid.

Wanneer DiaClin OogSpray niet te gebruiken

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Gebruik bij kinderen en ouderen

DiaClin OogSpray is geschikt voor kinderen en ouderen.

Interacties met geneesmiddelen

Er is geen negatieve interactie (wisselwerking) tussen DiaClin OogSpray en geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen bijwerkingen bekend wanneer DiaClin OogSpray wordt gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding.

Bewaarcondities

Wij raden u aan om DiaClin OogSpray tussen de 10°C en 25°C te bewaren. Bewaar DiaClin OogSpray buiten het bereik van kinderen. Gebruik DiaClin OogSpray niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Houdbaarheid

36 maanden. De houdbaarheidsdatum staat afgedrukt op de flacon en de verpakking.

Distributeur:
Actavis B.V., Baarn,
The Netherlands



Fabrikant:
DiaClin B.V., Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, The Netherlands

DiaClin SprayOculaire



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER DIACLIN SPRAYOCULAIRE.
GARDEZ CETTE NOTICE. VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE LA RELIRE.

DiaClin SprayOculaire soulage les yeux secs et irrités

- Prévient les infections oculaires bactériennes
- Réduit la sensibilité et la rougeur oculaires

Comment agit DiaClin SprayOculaire

La peau et les muqueuses hébergent de nombreux champignons, bactéries et levures. Ces micro-organismes, présents sur la peau et les muqueuses, portent le nom de "microflore". Il y a de "bons" et de "mauvais" micro-organismes. Dans des conditions normales, ces micro-organismes cohabitent en parfait équilibre. Les bons micro-organismes (utiles) protègent le corps contre les micro-organismes pathogènes. Lorsque la microflore est bien équilibrée, le corps bénéficie d'une protection optimale contre les facteurs externes (telles que les infections ou les micro-organismes pathogènes). En revanche, lorsque cet équilibre est perturbé et que les "mauvais" micro-organismes prédominent, des infections peuvent se développer.

La principale substance active est le complexe 2QR breveté, qui optimise la flore cutanée. Ce composant bioactif breveté neutralise efficacement les micro-organismes nocifs en bloquant leur fixation sur la peau et les muqueuses. Ainsi, ces bactéries ne peuvent pas se fixer sur nos cellules corporelles, et ne peuvent donc pas occasionner de lésions à nos cellules. L'action unique du produit repose sur l'élimination sélective des bactéries nocives, sans qu'aucun effet ne soit observé sur les bonnes bactéries. La substance active peut ainsi restaurer efficacement la microflore naturelle et prévenir efficacement l'inflammation et les infections.


Indications d'utilisation

DiaClin SprayOculaire est indiqué chez les personnes diabétiques souffrant d'une sécheresse, d'une rougeur, d'une irritation ou d'une sensation de brûlure au niveau des yeux.

DiaClin SprayOculaire est enregistré comme dispositif médical.

Ingrédients

Polymère croisé d'acide polyglucuronique galactoarabinan*, agents filmogènes, composants favorisant la production de salive, émoullissants et humidifiants.

 *complexe 2QR : polysaccharides bioactifs brevetés. www.2QR.com

La composition bioactive de DiaClin SprayOculaire:

- Est basée sur le complexe breveté 2QR
- Une sensation agréable, est naturelle, sûre et inoffensive
- Est garantie sans urée, sans conservateurs ni substances irritantes

Effets indésirables

Aucun effet indésirable n'a été observé.

Les réactions allergiques à l'un des composants de DiaClin SprayOculaire sont très rares. En cas de doute, nous vous recommandons de pulvériser une petite quantité de spray oculaire sur votre avant-bras et de laisser agir un moment. Si une plaque rouge apparaît, accompagnée de démangeaisons, nous vous conseillons de ne pas utiliser DiaClin SprayOculaire.

Note

DiaClin SprayOculaire peut provoquer une sensation de picotement ou de fourmillement pendant 5 à 20 secondes après l'application. Cette sensation révèle un changement dans la composition du corps vitré. Elle n'a aucun effet négatif sur l'œil, ni sur l'efficacité du produit. La sécurité du DiaClin SprayOculaire et de tous ses ingrédients est testée et approuvée.

Dans quels cas DiaClin SprayOculaire ne doit pas être utilisé
Il n'existe aucune contre-indication connue.

Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

DiaClin SprayOculaire convient aux enfants et aux sujets âgés.

Interactions avec des médicaments

Aucune interaction négative n'a été signalée entre DiaClin SprayOculaire et des médicaments.

Grossesse et allaitement

Aucun effet indésirable n'a été signalé lors de l'utilisation de DiaClin SprayOculaire pendant la grossesse ou l'allaitement.

Conditions de conservation


Nous vous conseillons de conserver DiaClin SprayOculaire à une température comprise entre 10 °C et 25 °C.

Tenir ce médicament hors de la portée des enfants.
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption.


Durée de conservation

36 mois. La date de péremption est indiquée sur le flacon et sur l'emballage.


Comment utiliser le produit*

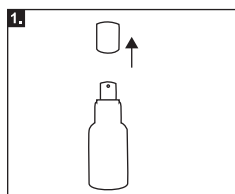

1. Enlever le capuchon du flacon.

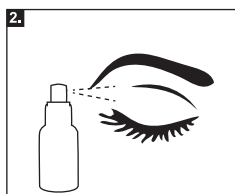

2. Pulvériser une fois à une distance d'environ 8 cm sur la paupière (fermée).

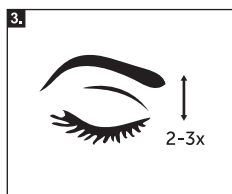

3. Clignez des yeux 2 à 3 fois.

*Lors de la première utilisation, actionner plusieurs fois la pompe pour amorcer le pulvérisateur.

Distribution:
Actavis B.V., Baarn,
The Netherlands

Production:
DiaClin B.V., Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, The Netherlands