

Otrivin Baby Aspirator – Neusjesreiniger voor baby's.

Lees aandachtig de instructies op de verpakking alvorens dit product te gebruiken.

Neusaspiratie wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van uw baby en dit zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd van uw baby. Dit product werd ontworpen om te helpen het neusje van uw baby te reinigen door storend neusslijm op een zachte manier te verwijderen. Het bevat een absorberende filter, wat een perfecte hygiëne garandeert. Zijn nieuwe ergonomische vormgeving en zachte toets garanderen een betere toepassing. Otrivin Baby Aspirator is zacht voor het neusje van de baby dankzij de zachte neusdopjes, welke ontwikkeld zijn om perfect en veilig in het neusje van de baby gebruikt te worden. Er worden 2 zachte wegwerpdopjes geleverd bij Otrivin Baby Aspirator. Eenvoudig, veilig en hygiënisch in gebruik. Otrivin Baby Aspirator helpt uw baby normaal te ademen, te eten, te slapen en zich weer beter te voelen.

Geschikt voor baby's, peuters en kinderen. Indien nodig, dient u bij pasgeboren baby's eerst medisch advies in te winnen. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de medische hulpmiddelen.

Geen gebroken of beschadigd product gebruiken.

Om hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik. Na gebruik dienen deze verwijderd te worden.

Vraag raad aan uw drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Hoe Otrivin Baby Aspirator te gebruiken?

1. Plaats een zacht neusdopje (A) op het centraal gedeelte (B) van het toestel.
2. Plaats het mondstuk (C) in de mond en het einde van het neusdopje (A) in één van de neusgaten van de baby.
3. Zuig zachtjes, traag en regelmatig door het mondstuk (C).
4. Indien het neusdopje vol is tussen 2 aspiraties, verwijder het slijm in een zakdoek door op het mondstuk te blazen of vervang het neusdopje.
5. Herhaal deze handeling in het andere neusgat.
6. Verwijder het neusdopje (A) en gooi deze weg.

Samenstelling: Aspirator: polypropyleen, styreen-ethyleen-butyleen-styreen, siliconen.

Neusdopje: PVC en melamine schuim.

Bewaring:

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Beschermen tegen warmte.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.


Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Inhoud: 1 aspirator en 2 zachte wegwerpdopjes.

Wegwerpdopjes apart verkrijgbaar in doosjes van 8 stuks.

Fabrikant: Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, 1260, Nyon, Zwitserland

Verdeler: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ ZEIST, Nederland

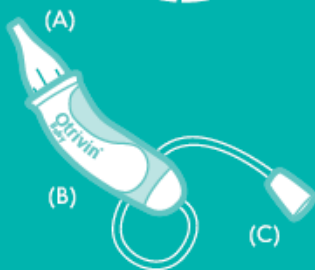

www.otrivinbaby.nl



CE
Medisch hulpmiddel

NL 933649