



Otrivin[®] Baby

Neusspray

Isotone Zoutoplossing met 0,74% natriumchloride

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Zoutoplossing gebruikt. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist.

Als gevolg van een opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies hebben baby's, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling door de neus. Een overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby's en is een algemeen teken van een verstopte neus of een loopneus bij verkoudheid. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan verwijderen door het neusje te snuiten, kan hij – in deze situaties – moeite met ademen, eten en slapen hebben en daarom geïrriteerd en onrustig zijn.

De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te voorkomen en te verlichten.

1. Wat is Otrivin Baby Zoutoplossing en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin Baby Zoutoplossing is een isotone zoutoplossing. De zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie welke bekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen.

Daarom wordt Otrivin Baby Zoutoplossing aanbevolen om:

- zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn (bv. tijdens een verkoudheid) of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm of de allergische deeltjes zoals stof of stuifmeel.
- het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vlieg reizen) of als gevolg van andere lichte neusirritaties.
- ingedikt neusslijm vloeibaar te maken, waardoor dit makkelijker te verwijderen is.

2. Voor u Otrivin Baby Zoutoplossing gebruikt

Otrivin Baby Zoutoplossing bevat benzalkoniumchloride, dat een lokale allergische reactie kan veroorzaken bij diegenen die gevoelig zijn voor deze stof.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Gebruik geen gebroken of beschadigde neusspray.

Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen wanneer het product gebruikt wordt waarvoor het bestemd is. Men dient echter een arts te consulteren als men Otrivin Baby Zoutoplossing wil gebruiken na een neusoperatie of een kwetsuur ter hoogte van de neus.

Omwille van zijn reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Baby Zoutoplossing het best eerst gebruiken wanneer uw baby of kind ook een geneesmiddel via de neus moet innemen (bv. bij verkoudheid of allergische rhinitis).

Otrivin Baby Zoutoplossing kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

3. Hoe gebruikt u Otrivin Baby Zoutoplossing?

Geschikt voor zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

Voor zuigelingen en peuters (tot 2 jaar): 1 verstuiving in elk neusgat naar behoefte.

Voor volwassenen en kinderen (ouder dan 2 jaar): 1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat naar behoefte.

De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat.

1. De neus snuiten indien nodig.
2. Verwijder het beschermende dopje van de neusspray. Plaats de duim onderaan het flesje en de verstuiver tussen de wijsvinger en middenvinger. Bij het eerste gebruik dient men de neusspray eerst een aantal keer in de lucht te verstuiven om een gelijkmatige verstuiving te krijgen. De neusspray is dan klaar voor gebruik.
3. Breng de punt van de neusspray voorzichtig in het neusgat. Verstuif en adem tegelijkertijd in via de neus. Herhaal in het andere neusgat.
4. Maak de verstuiver schoon en houd hem droog na gebruik. Plaats het beschermende dopje terug.

Om hygiënische redenen en om infecties te vermijden, mag de neusspray slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.

4. Voor uw veiligheid

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Baby Zoutoplossing heel goed verdragen. Indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product, contacteer dan uw arts, apotheker of drogist.

5. Hoe bewaart u Otrivin Baby Zoutoplossing?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeld staat op de verpakking.

Bewaar onder 30 °C. Bescherm tegen hitte. Bewaar de neusspray in de originele verpakking.

6. Verdere informatie

Samenstelling: 0,74% natriumchloride, benzalkoniumchloride (bewaarmiddel), dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, dinatriumfosfaat en gezuiverd water.

Otrivin Baby Zoutoplossing is beschikbaar als een neusspray van 15 ml.



Novartis Consumer Health S.A.,
Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Zwitserland.

Verdeeld door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ ZEIST, Nederland.



medisch hulpmiddel

Datum: Oktober 2013.

www.otrvinbaby.nl

NL 933662 – 150138



zelfzorg.nl