

Otrivin[®]

Zoutoplossing

Care

Neusspray (doseerspray)
met zeezout en dexpanthenol

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens u Otrivin Zoutoplossing Care gebruikt. Vraag uw arts of apotheker indien u bijkomende vragen heeft.

Waarom is neushygiëne zo belangrijk?

Het is belangrijk om het neusslijmvlies optimaal te bevochtigen, zodat de neus al zijn functies kan uitvoeren (filteren, bevochtigen, verwarmen). Bij baby's, kinderen en volwassenen kan verstopping, korstvorming en uitdrogen van de neusslijmvlies vaak leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en kan dit in sommige gevallen oor-, neus-, keel- en luchtweginfecties veroorzaken. Het is aangeraden om preventief de neusholten vrij te houden van overtollig slijm en ook van vreemde lichamen welke irritatie kunnen veroorzaken.

1. WAT IS OTRIVIN ZOUTOPLOSSING CARE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Otrivin Zoutoplossing Care is een neusspray (doseerspray) welke zeezout en dexpanthenol bevat. Zeezout bevat belangrijke mineralen en sporelementen. Dexpanthenol is een provitamine B5 (pantotheenzuur). Het product bevat geen conserveermiddelen en – dankzij zijn microdoseringstechnologie – geen drijfgas.

Als zoutoplossing met dexpanthenol, wordt **Otrivin Zoutoplossing Care** aangeraden voor:

Reinigen van de neusholten

Het product verdunt ingedikt neusslijm waardoor het makkelijker te verwijderen is. Tevens spoelt het overtollig neusslijm weg gedurende verkoudheden of allergische aandoeningen. Zijn reinigend effect helpt bovendien om luchtverontreinigende stoffen zoals stofdeeltjes of pollen te elimineren en vergroot daardoor de natuurlijke reinigingsfunctie van de neus.

Bevochtigen van de neusholten

De toevoeging van dexpanthenol aan de formule verhoogt de hydraterende werking van de zeezoutoplossing welke verlichting biedt als de neusholten droog of geïrriteerd geraakt zijn door kleine neusirritaties of een lage luchtvochtigheid (vb. in verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning of tijdens vlieguren).

Genezing van het neusslijmvlies

In aanvulling tot de reinigende en hydraterende eigenschappen, ondersteunt dexpanthenol ook de genezing en het herstel van pijnlijke en geïrriteerde neusslijmvlies.

Otrivin Zoutoplossing Care is geschikt voor zwangere vrouwen.

2. VOOR U OTRIVIN ZOUTOPLOSSING CARE GEBRUIKT

Gebruik **Otrivin Zoutoplossing Care** niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

Vraag uw arts om advies na een neusoperatie of een wond aan de neus.

Otrivin Zoutoplossing Care kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Gebruik de spray niet wanneer deze beschadigd of gebroken is.

Omwille van zijn reinigende eigenschappen is het aangeraden om **Otrivin Zoutoplossing Care** te gebruiken alvorens u een andere neusspray gebruikt (vb. bij verkoudheid of neusallergie).

3. HOE GEBRUIKT U OTRIVIN ZOUTOPLOSSING CARE?

Otrivin Zoutoplossing Care is geschikt voor baby's vanaf 6 maanden, kinderen en volwassenen.

Baby's vanaf 6 maanden en peuters tot 2 jaar: 1 verstuiving in elk neusgat, 2 maal per dag, naar gelang de nood.

Kinderen van 2 tot 12 jaar: 1 verstuiving in elk neusgat, 2 tot 4 maal per dag, naar gelang de nood.

Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen: 1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 2 tot 4 maal per dag, naar gelang de nood.

Bij een neusverkoudheid dient u eerst de neus te snuiten alvorens u dit product gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

1. Indien nodig, snuit eerst de neus.
2. Verwijder het bescherm dopje van de spray.



Fig. 1

Indien u de spray voor de eerste keer gebruikt, spray enkele keren in de lucht tot u een gelijkmatige spray bekomt (Fig. 1).

De doseerspray is klaar voor gebruik.

- **Baby's vanaf 6 maanden en peuters tot 2 jaar:** Breng het neusdopje voor de opening van het neusgat zonder dat u deze in de neus steekt. Verstuif één keer. Herhalen in het andere neusgat.



Fig. 2

- **Kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen:** Breng het neusdopje in het neusgat. Verstuif één of twee keer en adem zachtjes door de neus. Herhaal in het andere neusgat (Fig. 2). Na gebruik dient u het neusstukje schoon te maken, af te drogen en het beschermkapje weer aan te brengen.

Om hygiënische redenen mag elke doseerspray slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.
Indien u nog verdere vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag uw arts of apotheker.

Verpakkingsgrootte: 20 ml doseerspray.
Fabrikant: Novartis Consumer Health S.A.
Route de l'Etraz – 1260 Nyon, Zwitserland.

Verdeler: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Nederland.

4. VOOR UW VEILIGHEID

In uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties voorkomen.

5. HOE BEWAART U OTRIVIN ZOUTOPLOSSING CARE?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Niet gebruiken na de uiterste vervaldatum welke u terugvindt op de verpakking na EXP.

Na eerste opening, niet langer dan 6 weken gebruiken.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.



Medisch hulpmiddel

Augustus 2012

6. BIJKOMENDE INFORMATIE

Samenstelling: Otrivin Zoutoplossing Care bevat dexpanthenol (5%), zeezout, gezuiverd water, kaliummonowaterstoffsfaat en kaliumdiwaterstoffsfaat.

Zonder conserveermiddelen.

Eén verstuiving komt overeen met 0,14 ml vloeistof.

NL 933655



zelfzorg.nl