


Predictor<sup>®</sup> Early zwangerschapstest voor thuisgebruik kan het zwangerschapshormoon vanaf 6 dagen voor de uitgebleven menstruatie waarnemen.  
Lees de instructies zorgvuldig voordat je de test uitvoert.



## INSTRUCTIES


### WANNEER TESTEN ?

Je kunt **vanaf 6 dagen voor** de uitgebleven menstruatie testen met Predictor<sup>®</sup> Early.

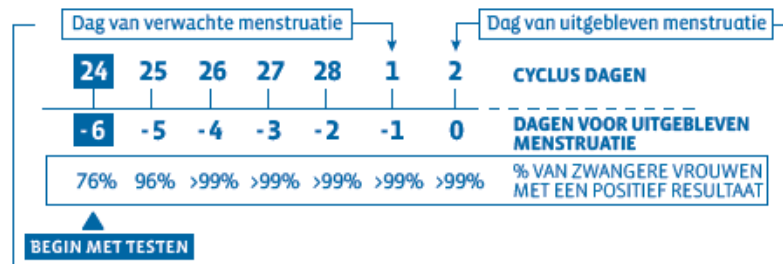

Laboratorium studies tonen aan dat Predictor<sup>®</sup> Early meer dan 99% nauwkeurig is vanaf de dag van de verwachte menstruatie.

Als je na het lezen van de instructies klaar bent om de test uit te voeren, haal dan de teststick uit de folieverpakking en verwijder de roze huls van de test.

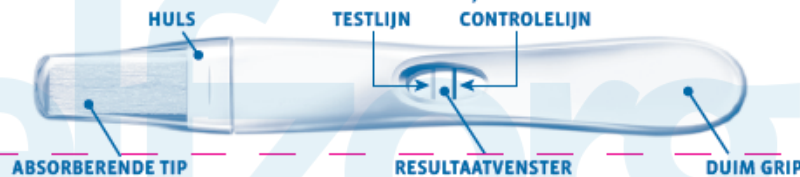

### STAP 1 TEST UITVOEREN

1. In de urinestraal testen.




Houd de teststick met de absorberende tip naar beneden in de urinestraal gedurende **5 seconden**.

2. **OF** Urine opvangen in een schoon, droog bakje.



Houd de gehele absorberende tip in de urine gedurende **5 seconden**.

Houd de teststick tijdens de test nooit met de absorberende tip naar boven.

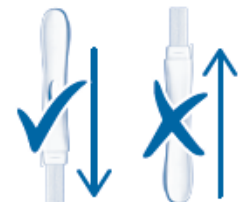

### STAP 2 WACHT 3 MINUTEN


Plaats de huls terug op de test en leg de test op een vlakke ondergrond met het venster naar boven gericht.



Wacht **3 minuten** voordat je het resultaat afleest.

### STAP 3 RESULTAAT AFLEZEN

#### ZWANGER

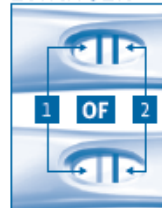

Twee roze strepen in het resultaatvenster: testlijn<sup>(1)</sup> aan de linkerkant en de controlelijn<sup>(2)</sup> aan de rechterkant. **Het kan voorkomen dat één van de strepen lichter of donkerder is dan de andere.** Het resultaat is dan ook positief.

#### NIET ZWANGER



Eén roze streep in het resultaatvenster.

De controlelijn verschijnt als de test correct is uitgevoerd. Er moet altijd ten minste één streep zichtbaar zijn in het resultaatvenster. Als er geen streep verschijnt, is er een fout opgetreden en is het resultaat ongeldig. Het kan zijn dat er te weinig urine is aangebracht op de absorberende tip. Herhaal de test met een nieuwe Predictor<sup>®</sup> Early test, volg daarbij nauwkeurig de aanwijzingen op. **Lees het resultaat 3 minuten na het uitvoeren van de test af. Bekijk het resultaat niet meer na 10 minuten.**



## VRAAG & ANTWOORD

### Hoe werkt Predictor® Early?

Predictor® Early meet de hoeveelheid van het zwangerschapshormoon, humaan Choriongonadotrofine (hCG), aanwezig in de urine van een zwangere vrouw. Dit hormoon, dat geproduceerd wordt wanneer je zwanger bent, wordt direct na de innesteling aangemaakt door de placenta en neemt snel toe in het vroege stadium van de zwangerschap. Predictor® Early is extra nauwkeurig in het aantonen van een zwangerschap omdat het meerdere vormen van het zwangerschapshormoon waarneemt. De analytische gevoeligheid van de test is 10 mIU/ml hCG.

### Wanneer kan ik Predictor® Early gebruiken?

Door de hoge gevoeligheid kan Predictor® Early al 6 dagen voor de uitgebleven menstruatie hCG waarnemen. Sommige vrouwen zullen niet genoeg zwangerschapshormoon in hun urine hebben op de dag dat ze de test uitvoeren. De hoeveelheid zwangerschapshormoon stijgt naarmate de zwangerschap vordert. In klinische studies had 76% van de zwangere vrouwen 6 dagen voor de dag van de uitgebleven menstruatie (5 dagen voor de verwachte menstruatie) een waarneembaar hCG niveau. Predictor® Early kan ieder moment van de dag gebruikt worden. Overmatig drinken voor het uitvoeren van de test kan het resultaat beïnvloeden, drink normale hoeveelheden voordat je test.

### Wat is de Early Detection Technology?

Met de Early Detection Technology kan Predictor® Early lage niveaus van het zwangerschapshormoon waarnemen, met name de vroege zwangerschapshormoon variant. De unieke technologie geeft Predictor® Early de mogelijkheid om heel vroeg en met ongeëvenaarde nauwkeurigheid een zwangerschap aan te tonen.

### Hoe nauwkeurig is de test?

Laboratorium studies tonen aan dat Predictor® Early meer dan 99% nauwkeurig is vanaf de dag van de verwachte menstruatie. Als u vermoedt dat u een foutief resultaat afleest, volg dan de instructies onder "Wat moet ik doen als het resultaat positief is (zwanger)?" en "Wat moet ik doen als het resultaat negatief is (niet zwanger)?"

### Wanneer kan ik het resultaat aflezen?

Lees het resultaat 3 minuten na het uitvoeren van de test af. Bekijk het resultaat niet meer na 10 minuten.

### Ik heb langer dan 3 minuten gewacht en er is nog steeds geen resultaat zichtbaar in het venster. Wat moet ik doen?

Het resultaat moet binnen 3 minuten zichtbaar zijn. Er moet na 3 minuten ten minste één roze streep zichtbaar zijn in het resultaatvenster om te weten dat de test correct is uitgevoerd. Als er geen roze streep zichtbaar is, is de test ongeldig. Dit kan komen doordat er te weinig urine is aangebracht op de absorberende tip of de absorberende tip is niet met het uiteinde naar beneden gehouden bij het terugplaatsen van de huls. Herhaal de test met een nieuwe Predictor® Early, volg daarbij nauwkeurig de instructies op.

### Wat moet ik doen als het resultaat positief is (Zwanger)?

Een positief resultaat betekent dat de test het zwangerschapshormoon hCG heeft waargenomen. Het is altijd aanbevolen om de uitslag te bevestigen met Predictor® Express op de dag van de verwachte menstruatie. Neem na het bevestigen van je zwangerschap met Predictor® Express contact op met je huisarts of een verloskundige om de zwangerschap vast te stellen. Als de test positief is, maar jij denkt dat je niet zwanger bent, neem dan contact op met je huisarts.

### Wat moet ik doen als het resultaat negatief is (Niet Zwanger)?

Een negatief resultaat betekent dat je niet zwanger bent of dat het niveau van het zwangerschapshormoon hCG nog te laag is om gemeten te worden. Het kan ook zijn dat je de dag van je uitgebleven menstruatie verkeerd ingeschat hebt. Is de uitslag negatief, maar heb je toch het gevoel dat je zwanger bent? Herhaal de test dan op de dag van je verwachte menstruatie met een nieuwe Predictor® Early of Predictor® Express. Neem contact op met je huisarts, als de test negatief is en je menstruatie uitblijft.

### Hoe kan het dat ik een positief resultaat had en toch ben gaan menstrueren?

Na een positief resultaat bestaat de kans dat er toch een menstruatie optreedt. In de tijd tussen de ovulatie en de dag van de uitgebleven menstruatie kan er veel gebeuren in je lichaam. In de eerste weken na de bevruchting is het risico aanwezig dat door late innesteling of door andere biologische oorzaken er mogelijk geen zwangerschap tot stand komt. Een vrouw kan positief testen met een vroege test en een paar dagen later negatief. Predictor® Early geeft een positief resultaat op dat moment van de vroege test omdat het zwangerschapshormoon in je lichaam aanwezig is. Daarom is het altijd aanbevolen om de uitslag te bevestigen met Predictor® Express op de dag van de verwachte menstruatie.

### Kan ik de positieve test bewaren?

Een positief resultaat zal onveranderd zichtbaar blijven in het resultaatvenster. De test kan dus bewaard worden om bijvoorbeeld aan familie en vrienden te laten zien of voor in het eerste album van je baby.

### Kunnen geneesmiddelen het resultaat beïnvloeden?

Alleen geneesmiddelen die het zwangerschapshormoon humaan Choriongonadotrofine (hCG) bevatten, kunnen effect hebben op het resultaat. Andere vruchtbaarheid medicijnen (zoals Clomid), antibiotica, alcohol, pijnstillers of anticonceptie pillen hebben geen invloed op het resultaat. Raadpleeg bij twijfel je huisarts of verloskundige.

### Meer vragen?

Kijk op [www.predictor.nl](http://www.predictor.nl)

Mail naar [consumentenservice@predictor.nl](mailto:consumentenservice@predictor.nl). Bel met de Predictor Consumentenservice van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur, telefoonnummer: 010 425 39 55.

### HET BELANG VAN FOLIUMZUUR EN VITAMINE D

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen met een kinderwens en zwangere vrouwen om de dagelijkse voeding met 400 microgram foliumzuur aan te vullen, van 4 weken voor de conceptie tot en met 10 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. In het verdere verloop van de zwangerschap blijft de behoefte aan foliumzuur verhoogd ter ondersteuning van de ontwikkeling van de baby en om bij te dragen aan de vorming van de placenta en rode bloedcellen. Wanneer je zwanger bent adviseert de Gezondheidsraad om naast de normale voeding dagelijks 10 microgram extra vitamine D in te nemen.

Davitamon Foliumzuur met vitamine D voorziet in de dagelijks aanbevolen hoeveelheid extra foliumzuur en vitamine D zoals geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad. Het smelttabletje met pepermuntmaak is gemakkelijk zonder water in te nemen en lost eenvoudig op in de mond. Voor (aanstaande) moeders die liever een multivitaminen gebruiken, is er Davitamon Compleet Mama en Davitamon Compleet Mama Plus Omega-3 Visolie. De samenstelling van de producten is zorgvuldig geselecteerd en ze bevatten naast vitamines en mineralen extra foliumzuur en vitamine D. Kijk voor meer informatie op [www.davitamon.nl/zwanger](http://www.davitamon.nl/zwanger).

Predictor®

## OVER PREDICTOR®

Predictor® is geïntroduceerd in 1971 en is de eerste zwangerschapstest voor thuisgebruik. Predictor® biedt een compleet en betaalbaar assortiment voor vrouwen die zwanger willen worden.

### HET PREDICTOR® ASSORTIMENT BESTAAT UIT:

**Predictor® Express:** Extra snel, met Predictor® Express weet je binnen 1 minuut of je zwanger bent als je test vanaf de dag van je verwachte menstruatie.

**Predictor® Early:** Door de hoge gevoeligheid kun je met Predictor® Early vanaf 6 dagen voor je uitgebleven menstruatie testen of je zwanger bent.

**Predictor® Early + Express:** 1 Predictor® Early om vanaf 6 dagen voor de uitgebleven menstruatie te testen of je zwanger bent + 1 Predictor® Express om het resultaat binnen 1 minuut te bevestigen vanaf de dag van de verwachte menstruatie.

Gebruik de test niet als de uiterste gebruiksdatum is verstreken (zie verpakking). Bewaren bij temperatuur 4-30°C, op een droge plaats. Niet invriezen. Niet boven 30°C bewaren. Zwangerschapstest voor thuisgebruik. Niet voor inwendig gebruik. De test is voor eenmalig gebruik. Gooi de gebruikte teststick in de prullenbak. Niet doorspoelen in het toilet. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik de test niet als het folie geopend of beschadigd is.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA. E.U. representative: Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, Engeland.

Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam.

Laatste revisie datum: mei 2017



CE 0086

