


Predictor® Express zwangerschapstest voor thuisgebruik is zo gevoelig, de test geeft binnen **1 minuut** aan of je wel of niet zwanger bent op de dag van je verwachte menstruatie of de dag van de uitgebleven menstruatie en later. Nu kan de meest spannende vraag zo snel mogelijk beantwoord worden! Lees de instructies zorgvuldig voordat je de test uitvoert.



INSTRUCTIES


WANNEER TESTEN ?

Je kunt Predictor® Express gebruiken op de dag van je verwachte menstruatie of de dag van de uitgebleven menstruatie en later.

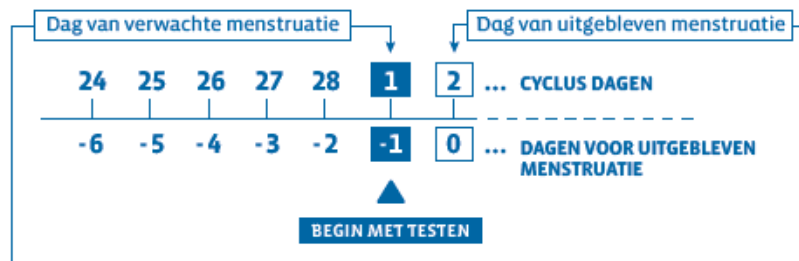

Laboratorium studies tonen aan dat Predictor® Express meer dan 99% nauwkeurig is op de dag van de verwachte menstruatie.

Als je na het lezen van de instructies klaar bent om de test uit te voeren, haal dan de teststick uit de folieverpakking en verwijder de roze huls van de test.

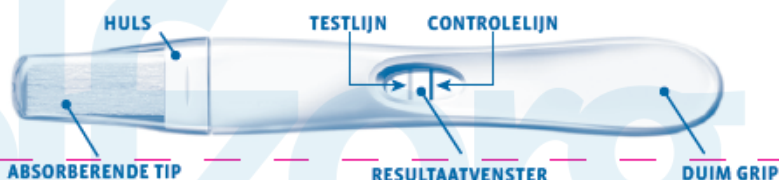

STAP 1 TEST UITVOEREN

1. In de urinestraal testen.




Houd de teststick met de absorberende tip naar beneden in de urinestraal gedurende **5 seconden**.

2. **OF** Urine opvangen in een schoon, droog bakje.



Houd de gehele absorberende tip in de urine gedurende **20 seconden**.

Houd de teststick tijdens de test nooit met de absorberende tip naar boven.

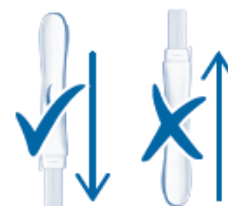

STAP 2 WACHT 1 MINUUT


Plaats de huls terug op de test en leg de test op een vlakke ondergrond met het venster naar boven gericht.



Wacht **1 minuut** voordat je het resultaat afleest.

STAP 3 RESULTAAT AFLEZEN

ZWANGER

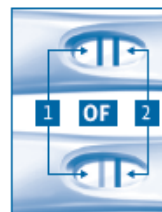

Twee roze strepen in het resultaatvenster: testlijn⁽¹⁾ aan de linkerkant en de controlelijn⁽²⁾ aan de rechterkant. **Het kan voorkomen dat één van de strepen lichter of donkerder is dan de andere.** Het resultaat is dan ook positief.

NIET ZWANGER



Eén roze streep in het resultaatvenster.

De controlelijn verschijnt als de test correct uitgevoerd werd. Er moet altijd ten minste één streep zichtbaar zijn in het resultaatvenster. Als er geen streep verschijnt, is er een fout opgetreden en is het resultaat ongeldig. Het kan zijn dat er te weinig urine is aangebracht op de absorberende tip. Herhaal de test met een nieuwe Predictor® Express test, volg daarbij nauwkeurig de instructies op. **Lees het resultaat 1 minuut na het uitvoeren van de test af. Bekijk het resultaat niet meer na 10 minuten.**



VRAAG & ANTWOORD

Hoe werkt Predictor® Express?

Predictor® Express meet de hoeveelheid van het zwangerschapshormoon, humaan Choriongonadotrofine (hCG), aanwezig in de urine van een zwangere vrouw. Dit hormoon, dat geproduceerd wordt wanneer je zwanger bent, wordt direct na de innesteling aangemaakt door de placenta. Predictor® Express is extra nauwkeurig in het aantonen van een zwangerschap omdat het meerdere vormen van het zwangerschapshormoon waarneemt. De analytische gevoeligheid van het apparaat is 50 mIU/ml hCG.

Wanneer kan ik Predictor® Express gebruiken?

Je kunt Predictor® Express gebruiken op de dag van je verwachte menstruatie of de dag van de uitgebleven menstruatie en later. Predictor® Express kan ieder moment van de dag gebruikt worden. Overmatig drinken voor het uitvoeren van de test kan de testuitslag beïnvloeden, drink normale hoeveelheden voordat je test.

Hoe nauwkeurig is de test?

Laboratorium studies geven aan dat Predictor® Express meer dan 99% nauwkeurig is op de dag van de verwachte menstruatie. Als u vermoedt dat u een foutief resultaat afleest, volg dan de instructies onder "Wat moet ik doen als het resultaat positief is (zwanger)?" en "Wat moet ik doen als het resultaat negatief is (niet zwanger)?"

Wanneer kan ik het resultaat aflezen?

Lees het resultaat af 1 minuut na het uitvoeren van de test. Bekijk het resultaat niet meer na 10 minuten.

Wat moet ik doen als het resultaat positief is (Zwanger)?

Een positief resultaat betekent dat de test het zwangerschapshormoon hCG heeft gemeten. Het is aan te raden contact op te nemen met je huisarts of een verloskundige om de zwangerschap vast te stellen. Als de test positief is, maar jij denkt dat je niet zwanger bent, neem dan contact op met je huisarts.

Wat moet ik doen als het resultaat negatief is (Niet Zwanger)?

Een negatief resultaat betekent dat je niet zwanger bent of dat het niveau van het zwangerschapshormoon hCG nog te laag is om gemeten te worden. Het kan ook zijn dat je de dag van je verwachte menstruatie verkeerd ingeschat hebt. Is de uitslag negatief, maar heb je toch het gevoel dat je zwanger bent? Herhaal de test dan een paar dagen later met een nieuwe Predictor® Express. Neem contact op met je huisarts, als de test negatief is en je menstruatie uitblijft.

Kan ik de positieve test bewaren?

Een positief resultaat zal onveranderd zichtbaar blijven in het resultaatvenster. De test kan dus bewaard worden om bijvoorbeeld aan familie en vrienden te laten zien of voor in het eerste album van je baby.

Kunnen geneesmiddelen het resultaat beïnvloeden?

Alleen geneesmiddelen die het zwangerschapshormoon humaan Choriongonadotrofine (hCG) bevatten, kunnen effect hebben op het resultaat. Andere vruchtbaarheid medicijnen (zoals Clomid), antibiotica, alcohol, pijnstillers of anticonceptie pillen hebben geen invloed op het resultaat. Raadpleeg bij twijfel je huisarts of verloskundige.

Meer vragen?

Kijk op www.predictor.nl. Mail naar consumentenservice@predictor.nl. Bel met de Predictor Consumentenservice van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur, telefoonnummer: 010 425 39 55.

HET BELANG VAN FOLIUMZUUR EN VITAMINE D

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen met een kinderwens en zwangere vrouwen om de dagelijkse voeding met 400 microgram foliumzuur aan te vullen, van 4 weken voor de conceptie tot en met 10 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. In het verdere verloop van de zwangerschap blijft de behoefte aan foliumzuur verhoogd ter ondersteuning van de ontwikkeling van de baby en om bij te dragen aan de vorming van de placenta en rode bloedcellen. Wanneer je zwanger bent adviseert de Gezondheidsraad om naast de normale voeding dagelijks 10 microgram extra vitamine D in te nemen. Davitamon Foliumzuur met vitamine D voorziet in de dagelijks aanbevolen hoeveelheid extra foliumzuur en vitamine D zoals geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad. Het smelttabletje met pepermuntsmak is gemakkelijk zonder water in te nemen en lost eenvoudig op in de mond. Voor (aanstaande) moeders die liever een multivitamine gebruiken, is er Davitamon Compleet Mama en Davitamon Compleet Mama Plus Omega-3 Visolie. De samenstelling van de producten is zorgvuldig geselecteerd en ze bevatten naast vitamines en mineralen extra foliumzuur en vitamine D. Kijk voor meer informatie op www.davitamon.nl/zwanger.

Predictor®

OVER PREDICTOR®

Predictor® is geïntroduceerd in 1971 en is de eerste zwangerschapstest voor thuisgebruik. Predictor® biedt een compleet en betaalbaar assortiment voor vrouwen die zwanger willen worden.

HET PREDICTOR® ASSORTIMENT BESTAAT UIT:

Predictor® Express: Extra snel, met Predictor® Express weet je binnen 1 minuut of je zwanger bent als je test op de dag van je verwachte menstruatie.

Predictor® Early: Door de hoge gevoeligheid kun je met Predictor® Early vanaf 6 dagen voor je uitgebleven menstruatie testen of je zwanger bent.

Predictor® Early + Express: 1 Predictor® Early om vanaf 6 dagen voor de uitgebleven menstruatie te testen of je zwanger bent + 1 Predictor® Express om het resultaat binnen 1 minuut te bevestigen vanaf de dag van de verwachte menstruatie.

Gebruik de test niet als de uiterste gebruiksdatum is verstreken (zie verpakking). Bewaren bij temperatuur 4-30°C, op een droge plaats. Niet invriezen. Niet boven 30°C bewaren. Zwangerschapstest voor thuisgebruik. Niet voor inwendig gebruik. De test is voor eenmalig gebruik. Gooi de gebruikte teststick in de prullenbak. Niet doorspoelen in het toilet. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik de test niet als het folie geopend of beschadigd is.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA. E.U. representative: Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, Engeland.
Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam.

Laatste revisie datum: mei 2017

