



KALKNAGEL 4in1 GEL



LEES ZORGVULDIG DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U WARTNER® GEBRUIKT OM ONJUIST GEBRUIK TE VOORKOMEN.

GEBRUIK WARTNER® KALKNAGEL 4 IN 1 GEL

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is een medisch hulpmiddel voor de behandeling en preventie van kalknagels of nagels met neiging tot schimmelinfecties (dermatofyten en gisten). De gel is ontworpen voor de behandeling van zowel de teen- als de vingernagels. Het gebruik is bestemd voor de behandeling van lichte tot middelmatige kalk- en schimmelnagels. Kalk- en schimmelnagels kunnen worden gekenmerkt door verkleuring en verdikking van de besmette nagels die bros worden. De nagels en de omliggende huid kunnen droog of schilferig worden. Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel wordt sterk aanbevolen voor mensen die vaak blootgesteld zijn aan een warme en vochtige omgeving (frequent bezoek aan zwembaden, sportplaatsen, sauna's, openbare douches, enz.).

BEHANDELMETHODE

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel biedt een nieuwe gerichte behandelingsmethode met een AAN/UIT functie om de gepatenteerde formule toe te dienen.

De formule zorgt voor een vijandige micro-omgeving die nagels behandelt tegen allerlei schimmels zoals dermatofyten of gisten en symptomen van kalk- en schimmelnagels zoals verkleuring te verminderen. De geselecteerde ingrediënten hebben laagvormende eigenschappen en creëren een beschermende laag op de nagels.

Daarnaast bevat Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel 1,5-pentanol, die hydraterend is en in combinatie met glycerine en verfrissend citroenkruid ook herstellende en voedende eigenschappen bevat om het herstel naar een gezonde nagel te versterken. De natuurlijke nagel pH-waarde van 5,5-5,6, die zorgt voor de nodige stimulatie van proteïnen en enzymen die het immuunsysteem ondersteunt de infectie tegen te gaan, blijft behouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Was voor behandeling uw handen of voeten zorgvuldig. Gebruik bij voorkeur producten met zeepvrije milde stoffen.
 - 2) Behandel op een schone nagel zonder nagellak of nagellakremover resten.
 - 3) Draai de applicator naar 'ON' en dien een kleine hoeveelheid gel aan op de nagel.
 - 4) Breng een dunne laag aan op de gehele nagel. Wrijf de gel naar beneden richting je nagelriem en laat de gel drogen voor enkele minuten. De nagel kan eventueel worden schoongeveegd mocht dit nodig zijn. Maak de applicator schoon na gebruik en draai de applicator naar 'OFF'.
 - 5) Tweemaal per dag aanbrengen.
 - 6) Gebruik tijdens de behandelingsperiode geen andere preparaten zoals nagellak, poeders, sprays etc. De werkzaamheid van Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel kan hierdoor worden beïnvloed.
 - 7) De behandeling duurt tot de gezonde nagel de geïnfecteerde nagel vervangt. De behandelingsperiode is afhankelijk van de nagelgroei.
- Breng twee keer per dag aan gedurende een periode van 4 weken. Eerste verbeteringen zijn al na 1 week zichtbaar*. Grotere infecties hebben wellicht twee keer aanbrengen per dag voor een langere periode nodig voordat verbetering is te zien. Om verspreiding en herinfectie te helpen voorkomen, breng één keer per dag aan gedurende 9 maanden of totdat er een nieuwe gezonde nagel is gegroeid.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik niet op open wonden.
- Gebruik niet als de verpakking is beschadigd.
- Bij inname door kinderen, direct uw arts raadplegen en deze gebruiksaanwijzing verstrekken.
- Niet gebruiken na houdbaarheidsdatum.
- In twijfelgevallen, raadpleeg uw arts en verstrek deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik alleen zoals bedoeld. Interacties met andere medische hulpmiddelen zijn niet waargenomen. Wij raden echter niet aan om Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel te combineren met andere producten die hetzelfde probleem verhelpen, tenzij is overlegd met uw arts. In het geval van bijwerkingen of abnormale reacties raadpleeg direct uw arts en verstrek de verpakking.

WAARSCHUWINGEN

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is bedoeld voor volwassenen. Gebruik alleen zoals het bedoeld is. Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Gebruik niet in het geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Gebruik niet op open wonden. Stop het gebruik bij irritatie of allergische reactie. Raadpleeg een arts als de kalknagel blijft of erger wordt. Raadpleeg uw arts als u diabetes heeft, bloedcirculatieproblemen heeft, zwanger bent of borstvoeding geeft. Bewaar buiten zicht en bereik van kinderen. Bewaren op een donkere, koele, droge plek op kamertemperatuur.

INGREDIËNTEN

Water, Glycerine, 1,5-Pentanol, Propyleenglycol, Dimethicon, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, Carbomeer, Natriumhydroxide, Artemisia abrotanum blad /stam extract.

INHOUD

- Tube 7 ml

KLINISCHE ONDERZOEKEN* TONEN NA HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ÉÉN WEEK:


- Nagelverkleuring was significant verminderd.
- Nagels waren significant zachter.
- Nageldikte was significant verbeterd.

*Bovendien werd na 8 weken geconstateerd dat de nagels significant gladder waren en 88% van de gebruikers ervaren algemeen positieve effecten op hun nagels door het product. Gebruikers betrokken bij het onderzoek gebruikten het product strikt volgens aanbevolen indicaties. Productconsumptie varieerde afhankelijk van de grootte van de te behandelende plek. Test is uitgevoerd onder 24 gebruikers.

 Natum Pharma
Snickaregatan 10
566 33 Habo
Zweden

Distributeur:
Omega Pharma Nederland B.V.
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

BEWAREN

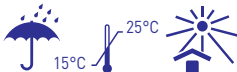

Voor meer informatie: www.wartner.nl

 0481